



BewiTech



the PortaBHB™
milk ketone test

PortaBHB milk ketone test

Инструкция

Инструкция по применению

1. Отберите пробу молока в чистый контейнер.



2. Достаньте тест-полоску из пластиковой баночки. Плотнo закройте крышку.



3. Опустите часть полоски с реагентом в контейнер с образцом.



4. Вытащите тест-полоску и стряхните излишки молока.

5. Пойдите 1 минуту и сравните с цветовой шкалой, размещенной на упаковке.



Примечания

- в случае если полоски или образцы молока были охлажденными, перед тестированием доведите их до комнатной температуры.
- в случае если молоко стояло некоторое время, перед применением теста тщательно перемешайте его.
- плотно закрывайте контейнер с полосками после использования. Тест-полоски чувствительны к влажности.
- тесты могут использоваться только в молоке. Результаты теста на других жидкостях не изучены.

Хранение и использование

- Хранить при температуре 2° - 25° С. Срок хранения продукта 2 года с даты производства. По возможности храните в холодильнике.
- Не используйте уже окрашенные после длительного хранения тест-полоски.
- Подушка с реагентом неиспользованной тест-полоски имеет желтую окраску.
- Держите контейнер с тест-полосками плотно закрытым.
- Не касайтесь подушки с реагентом на тест-полоске.

Интерпретация результатов

Концентрация ВНВ в молоке	Индикатор
0 – 99 ммоль/л	Норма (-)
100 – 199 ммоль/л	Сомнительно (+/-)
200 – 499 ммоль/л	Положительно (+)
500 + ммоль/л	Положительно (++)

Доступны баночки по 25 и 100 тест-полосок.
Срок годности 24 месяца с даты изготовления
Произведено PortaCheck, Inc., США.